

## Kurz-Gebrauchsanleitung

### 1. Installation



Konnektieren Sie das Ansatzstück mit der Wasserkammer.



Zum Einsetzen der Wasserkammer drücken Sie die Verriegelung mit dem Boden der Wasserkammer hinunter und schieben Sie die Wasserkammer auf die Heizplatte bis die Verriegelung einrastet.



Schließen Sie den Wasserbeutel/ die Wasserflasche an.



Prüfen Sie den Wasserstand in der Wasserkammer.



Schließen Sie das beheizte Schlauchsystem an.



Schließen Sie die Sauerstoffquelle am Sauerstofftank an.



Schließen Sie die Sauerstoffquelle am LM Flow an.



Schließen Sie den LM Flow an den Strom an.

## 2. Parametereinstellung




Drücken Sie die Menütaste um den Flow und die Temperatur über den Encoder auszuwählen.



Stellen Sie die Parameter mit dem Encoder ein.



Stellen Sie die gewünschte Sauerstoffkonzentration an der Sauerstoffquelle ein.

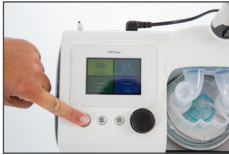

Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste für 3 Sekunden zum Starten der Therapie.



Passen Sie die Nasenbrille an.

## 3. Bei Therapie-Ende



Dekonnektieren/schließen Sie die Sauerstoffquelle.



Drücken Sie die Start-/Stopp-Taste für 3 Sekunden um die Therapie zu beenden und den Trocknungsmodus zu starten bzw. zu beenden.



Entfernen Sie das Schlauchsystem...



...und dekonnectieren Sie den Strom.



Prolinx  
Brehmstr. 56,  
40239 Düsseldorf, Deutschland



Shenyang RMS Medical  
No. 21, Gaoke Road,  
Hunnan New District, Shenyang, China

**Importeur + Vertrieb**

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems, Deutschland  
T. +49 2603 9600-0, F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com, loewensteinmedical.com



 Menschen im Mittelpunkt

CE 0197



gbar 104266e2206