

Hoe bevestig ik het polygrafie-apparaat Samoa?



1. Plaats het apparaat met borstband over het t-shirt en onder de oksels. De Samoa hoort stevig vast te zitten en comfortabel aan te voelen. Alleen zo zullen de sensoren betrouwbaar werken.




2. Bevestig de buikband op heuphoogte. De druksensor hoort zich aan de binnenkant van de band te bevinden.



3. Verbind het zwarte verbindingsstuk van de buikband met het zwarte verbindingsstuk aan de onderkant van het apparaat door hem een halve slag aan te draaien.



4. Plaats de vingersensor op de ringvinger. Knip eerst de nagel kort en verwijder eventuele nagellak. Steek uw vinger in de grijze hoes van de sensor zodat de kabel over de rug van uw hand loopt. Bevestig de kabel aan uw pols met de klittenbandriem.

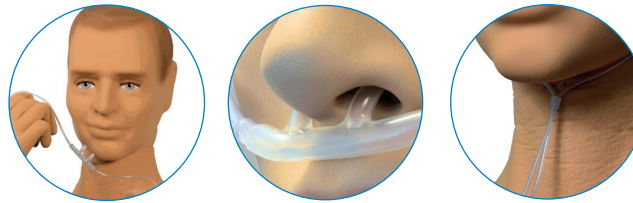


5. Bevestig nu de neuscanule door de neusstukjes in de neusgaten te plaatsen. Plaats de slangetjes achter de oren en onder de kin en maak ze vast met de plastic ring.



6. Als de neuscanule nog niet is verbonden, draai deze dan vast aan het witte verbindingsstuk aan de onderkant van het apparaat.

Het monitoren van de behandeling


Bevestig de T-adapter tussen de slang en het masker om de behandeling te monitoren. Schroef de slang van de T-adapter vast op het overgebleven witte verbindingsstuk aan de onderkant van het apparaat. **Gebruik de neuscanule niet!**

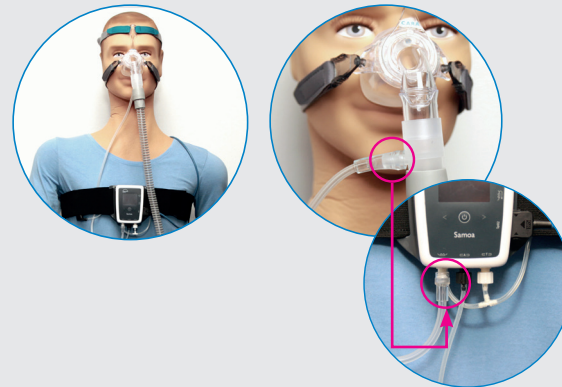

De opname beginnen


Automatisch beginnen

De opname begint en eindigt automatisch op de tijden die u met uw arts heeft ingesteld.

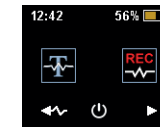

Handmatig beginnen

Om een opname handmatig te beginnen, houdt u de startknop (⏻) twee (2) seconden ingedrukt tot het display aan gaat en dit scherm verschijnt.

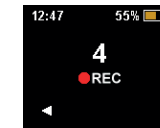

Druk op de rechter pijltoets (➡).

De opname begint nadat van vijf (5) naar nul (0) is afgeteld. Het display toont een rood lampje tijdens de opname.

De opname beëindigen

Het apparaat beëindigt de opname automatisch. U hoeft **niets** te doen.

Wanneer de opname de volgende ochtend is beëindigd, stopt u alle onderdelen terug in de tas en geeft u deze af bij uw arts.

OPMERKING: Omwille van de hygiëne moet u de neuscanule in een aparte tas stoppen!