

Poligraf

Samoa. Inteligentny, prosty, mały.

Podstawowe urządzenie z już przymocowanym paskiem na klatkę piersiową, który również mocuje Samoa do ciała, oraz kaniula nosowa, która jest już przymocowana do urządzenia.



- 1 Samoa z paskiem piersiowym
- 2 Kaniula donosowa
- 3 Pasek brzuszny
- 4 Czujnik napalcowy
- 5 Pasek rzepowy do mocowania czujnika napalcowego

Dowiedz się więcej o poligrafie Samoa:




LÖWENSTEIN medical

Sprzedaż + Serwis

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Niemcy
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com

loewensteinmedical.com



 Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Niemcy



© Materiał chroniony prawami autorskimi. Powielanie przy użyciu jakichkolwiek metod tylko za jednoznaczoną zgodą firmy Löwenstein Medical.

Skrócona instrukcja obsługi dla pacjentów

Poligraf

Samoa

Szanowny Pacjencie,

Twój lekarz przekazał Ci urządzenie diagnostyczne, którego możesz użyć u siebie w domu i które potrafi rozpoznawać potencjalne zaburzenia oddechu podczas snu.

Ta instrukcja pokaże Ci, jak założyć i zastosować to urządzenie. Warunkiem bezbłędnego zapisu parametrów jest prawidłowe zastosowanie poligrafu Samoa



Jak założyć na siebie poligraf Samoa?



1. Zamocuj urządzenie przy użyciu pasa piersiowego na koszulce i pod pachami. Urządzenie Samoa powinno być dopasowane ściśle, ale wygodnie. Tylko tak czujniki będą prawidłowo działać.




2. Załóż pas brzuszny na wysokości bioder. Czujnik ciśnienia powinien się znaleźć po wewnętrznej stronie pasa.



3. Połącz czarne złącze paska brzusznego z czarnym złączem w dolnej części urządzenia i Skręć je ze sobą, wykonując mniej więcej połowę obrotu.



4. Umieść czujnik napalcowy na palcu serdecznym. Paznokcie należy wcześniej krótko przyciąć, ewentualnie usunąć z niego lakier. Włóż palec w szarą tulejkę czujnika tak, by kabel biegł po grzbiecie dłoni. Zamocuj kabel na nadgarstku paskiem rzepowym.

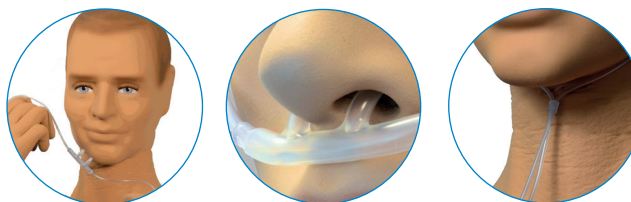


5. Teraz Załóż cewnik donosowy, umieszczając obie końcówki w nozdrzach. Rurki cewnika należy poprowadzić za uszami i pod podbródkiem, a następnie Zabezpiecz plastikowym pierścieniem.



6. Jeżeli cewnik donosowy nie został jeszcze podłączony, Wkręć go na wolne białe złącze w dolnej części urządzenia.

Monitorowanie terapii


Aby umożliwić monitorowanie terapii, należy umieścić i zamocować adapter T między rurką i maską oddechową. Wkręć rurkę adaptera T na wolne białe złącze w dolnej części urządzenia. **Nie Używaj dodatkowo cewnika donosowego!**

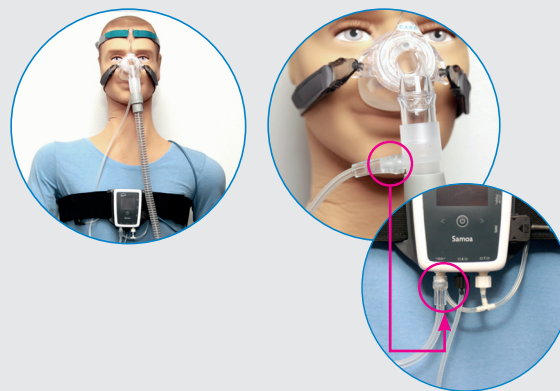


Rozpoczynanie zapisu


Automatyczna aktywacja zapisu


Zapis rozpoczyna i kończy się automatycznie w godzinach ustawionych przez personel lekarza.

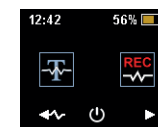

Manualna aktywacja zapisu

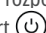Aby rozpocząć zapis manualnie, naciśnij przycisk Start  i przytrzymuj go przez mniej więcej dwie (2) sekundy do momentu włączenia wyświetlacza i wyświetlenia pokazanego tutaj ekranu.

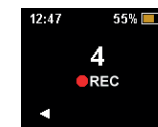

Naciśnij przycisk kierunkowy ze strzałką po prawej stronie . Zapis zaczyna się po zakończeniu odliczania od (5) do zera (0). Podczas zapisu na wyświetlaczu widać czerwony wskaźnik.

Zatrzymywanie zapisu

Urządzenie kończy zapis automatycznie. Pacjent **nie musi** nic robić.

Następnego dnia rano po zakończeniu zapisu należy umieścić wszystkie części w torbie i zwrócić urządzenie lekarzowi.

UWAGA: Ze względów higienicznych cewnik donosowy należy umieścić w oddzielnym woreczku!