

## Scala

Guide rapide pour les patients



### Chère patiente, Cher patient,

Votre spécialiste vous a confié un polygraphe qui vous permettra de diagnostiquer à domicile les troubles respiratoires du sommeil dont vous pourriez souffrir. Le présent guide vous expliquera rapidement comment appliquer l'appareil correctement. S'il est mal posé, le polygraphe Scala ne pourra pas effectuer les enregistrements escomptés.

### Aperçu

Scala déjà raccordé à la ceinture thoracique et aux lunettes nasales.

- 1 Adaptateur en T
- 2 Lunettes nasales
- 3 Ceinture abdominale
- 4 Capteur de doigt
- 5 Scala avec ceinture thoracique
- 6 Bande auto-agrippante



### Comment utiliser le polygraphe Scala ?



1. Placez l'appareil sur la poitrine en fixant la ceinture thoracique sous les aisselles.  
La ceinture du Scala doit être serrée, mais ne pas gêner la respiration pour que les capteurs fonctionnent en toute fiabilité.





3. Vissez le raccord noir de la ceinture ventrale d'environ un demi-tour sur l'embout noir sous l'appareil.



2. Placez la ceinture ventrale autour des hanches.  
Le capteur de pression doit être à l'intérieur de la ceinture.



4. Posez le capteur de doigt de préférence sur l'annulaire ; si nécessaire, coupez l'ongle ou enlevez le vernis à ongles au préalable. Enfoncez le doigt dans le capteur de façon que le câble passe sur le dessus de la main. Fixez le câble au poignet avec la bande auto-agrippante.

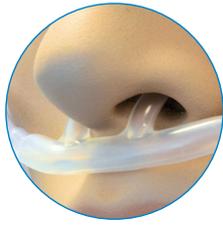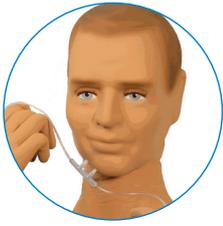


**5.** Placez les canules des lunettes nasales dans vos narines. Accrochez les tuyaux derrière vos oreilles. Ils doivent ensuite se rejoindre sous le menton ou ils sont fixés par un anneau en plastique.

**6.** Si les lunettes nasales ne sont pas encore branchées : branchez-les sur l'embout blanc sur le côté de l'appareil.

## Contrôle du traitement

Dans le cadre de contrôles de traitement, l'adaptateur en T est inséré entre le tuyau et le masque. Branchez les tuyaux en provenance de l'adaptateur en T sur le Scala. Vissez le tuyau rouge muni d'un bouchon blanc sur l'embout latéral blanc ; vissez le tuyau transparent muni d'un bouchon noir sur l'embout latéral noir.

**Cette opération se fait sans lunettes nasales!**

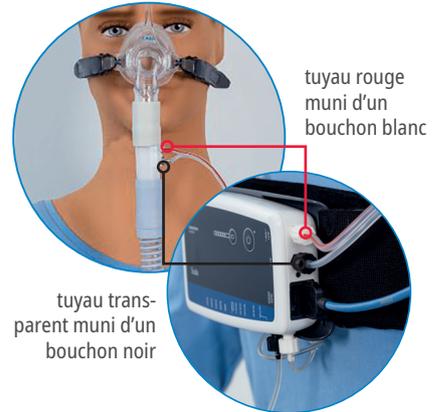

## Début de l'enregistrement

### Démarrage/Arrêt automatique

L'enregistrement démarre et s'arrête automatiquement aux horaires définis chez votre spécialiste.

### Démarrage/Arrêt manuel

L'enregistrement démarre dès que vous enfoncez le bouton Démarrer (⏻) pendant env. 2 secondes. L'appareil stoppe l'enregistrement automatiquement, vous n'avez **rien à faire**.



Pendant l'enregistrement, la LED verte clignote toutes les 4 secondes.

## Fin de l'enregistrement

L'appareil arrête l'enregistrement automatiquement. **Vous n'avez rien à faire.**

Le lendemain matin, une fois l'enregistrement terminé, rangez toutes les pièces dans la mallette et rapportez l'ensemble chez votre spécialiste.

**Important : pour des raisons d'hygiène, nous vous demandons de placer les lunettes nasales dans un sachet séparé.**

En savoir plus sur Scala :



  
Dr. Fenyves und Gut Deutschland  
Daimlerstraße 23  
72414 Rangendingen, Allemagne

**Maison mère**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Allemagne  
loewensteinmedical.com

**Ventes + Service**  
Löwenstein Medical Schweiz  
Seestrasse 14b  
5432 Neuenhof, Suisse  
T. +41 (0)56 4 16 41 26  
F. +41 (0)56 4 16 41 21  
info@loewensteinmedical.ch  
loewensteinmedical.com

**Ventes + Service**  
Löwenstein Medical France  
6, Rue de l'Aulnaye-Dracourt  
91300 Massy, France  
T. +33 (0)1 69 35 53 20  
france@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com

