


**LÖWENSTEIN**  
medical



**CARA**

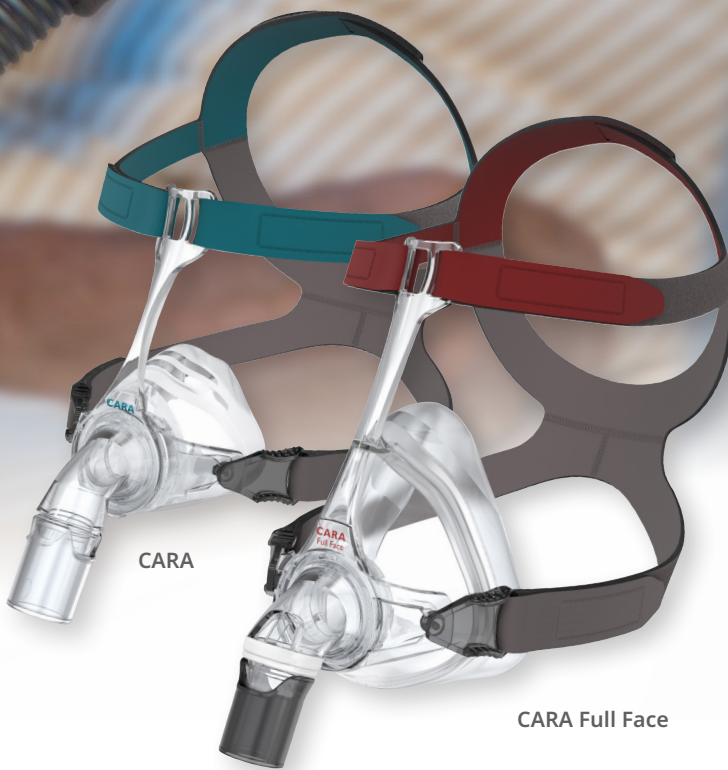

Превосходный сон.

 With people in mind

# CARA

## Превосходный сон.

Идеальное прилегание, высокая степень комфорта для пациента, приятный и легкий выдох, оптимальная совместимость с кожей – назальные и рото-носовые маски CARA современного образца соответствуют всем этим требованиям. Наши маски CARA убеждают пользователей своей легкостью, мягко и точно прилегающей подушкой маски, удобной регулировкой и другими продуманными деталями. Маски серии CARA – это оптимальное решение практически для всех пользователей.

### Мягкая насадка маски – идеальное и стабильное прилегание

Первое впечатление верно. Подушка маски мягкая, эластичная и комфортно прилегает к коже. При этом она прочно фиксируется на лице и в точности подходит к его контурам – оптимально для длительного комфортного пользования, причем даже без налобной подушки.

### Проверенное совершенство

Выдыхательная система щелевого типа, расположенная рядом с шарнирным соединением, используется на практике на протяжении десятилетий.

В масках серии CARA она дополнительно усовершенствована. Благодаря меньшему количеству частей облегчается пользование, уменьшен вес и улучшены экологические характеристики за счет сокращения материалов при производстве и утилизации.

Сохранены диффузный выдох, чтобы не беспокоить пациента и лежащего рядом с кровати, а также закрытая верхняя зона, чтобы выдыхаемый воздух не выходил в направлении глаз.

### CARA отмечена наградами

Серию CARA высоко оценили не только пользователи, она удостоена также признанных международных наград за дизайн, среди которых Focus Open и German Design Award.



Focus Open 2018  
Special Mention  
BADEN-WÜRTTEMBERG  
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

## Легко надеть.



1 Снимите с маски оба зажима.



2 Наденьте оголовье на голову.



3 Закрепите зажимы снизу на маске.



4 Отрегулируйте верхнюю часть оголовья так, чтобы она прилегала как можно свободнее, но при этом достаточно плотно.

Теперь  
имеется  
также размер  
**XL**

Оголовье с цветным кодированием  
– цветная зона  
(бирюзового или винного цвета) сверху

Мягкая, комфортно прилегающая  
насадка маски – в 4 размерах

Шнур для быстрого  
снятия

Чрезвычайно  
прочный  
материал

На выбор съемное крепление  
через специальную  
прорезь или неразъемное  
крепление

Бесшумная и диффузная  
выдыхательная система

Шарнирное соединение  
с вращением на 360° и 3D  
для неограниченной  
свободы движения



Отрегулируйте нижнюю часть оголовья аналогичным образом так, чтобы она прилегала как можно свободнее, но при этом достаточно плотно.



Отрегулируйте оголовье на голове так, чтобы оно внизу не касалось мочек ушей.



Установите налобник как можно свободнее, он не должен прилегать.



Наш видеоролик для пользователей имеется в YouTube.

## Запасные части



**Оголовье CARA**  
с зажимами ремней оголовья  
XS: WM 25191  
Стандарт: WM 25192



**Оголовье CARA Full Face**  
с зажимами ремней оголовья  
WM 25243



**Оголовье XL CARA/CARA Full Face**  
без зажимов ремней оголовья  
WM 25338



**Мягкая насадка маски CARA**  
Разм. XS: WM 25189  
Разм. S/M: WM 25238  
Разм. M/L: WM 25239  
Разм. XL: WM 25576



**Мягкая насадка маски CARA Full Face**  
Разм. S: WM 25601  
Разм. M: WM 25602  
Разм. L: WM 25603  
Разм. XL: WM 25676



**Шнур для быстрого снятия CARA Full Face**  
WM 25623

Дополнительная информация о наших терапевтических решениях, принадлежностях и системах масок имеется на сайте [loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

## Технические данные

	CARA	CARA Full Face		CARA	CARA Full Face
Класс продукта согласно Директиве (ЕС) по медицинским аппаратам 2017/745	II a	II a	Аэродинамическое сопротивление	0,2 гПа 0,9 гПа	0,12 гПа 0,5 гПа
Размеры (ширина x высота x глубина)	72 x 112 x 70 мм (размер XS) 72 x 117 x 70 мм (размер S/M) 72 x 118 x 70 мм (размер M/L) 70 x 125 x 75 мм (размер XL)	93 x 145 x 89 мм (размер S) 93 x 160 x 90 мм (размер M) 93 x 174 x 91 мм (размер L) 96 x 185 x 100 мм (размер XL)	Аэродинамическое сопротивление Аварийный выдыхательный клапан	-	0,6 гПа 0,8 гПа
Масса	58 г (размер XS) 59 г (размер S/M) 60 г (размер M/L) 69 г (размер XL)	93 г (размер S) 97 г (размер M) 102 г (размер L) 109 г (размер XL)	Давление срабатывания аварийного выдыхательного клапана	-	0,5 гПа 2,2 гПа
Объем мертвого пространства	74 г (размер XS) 76 г (размер S/M) 79 г (размер M/L) 98 г (размер XL)	180 мл (размер S) 219 мл (размер M) 244 мл (размер L) 291 мл (размер XL)	Указанное двузначное значение шумовыделения согласно ISO 4871:	18 дБ(A) 26 дБ(A) 3 дБ(A)	19 дБ(A) 27 дБ(A) 3 дБ(A)
Диапазон терапевтического давления	4 гПа – 30 гПа	4 гПа – 25 гПа	Срок годности	5 лет	5 лет
Подключение трубки: конус согласно EN ISO 5356-1	Ø 22 мм (штекер)	Ø 22 мм (штекер)	Срок пользования	до 12 месяцев <sup>1</sup>	до 12 месяцев <sup>1</sup>
Диапазон температур	от +5 °C до +40 °C от -20 °C до +70 °C	от +5 °C до +40 °C от -20 °C до +70 °C	Применимые стандарты	EN ISO 17510: 2020	EN ISO 17510: 2020

<sup>1</sup> Срок пользования зависит от очистки и используемого моющего средства, ежедневной продолжительности ношения, терапевтического давления и индивидуального потоотделения. Использование второй подушки маски (имеется в качестве опции) не продлевает срок пользования.

Обозначение аппарата	Разм.	№ артикула
CARA	XS	WM 25590
CARA	S/M	WM 25600
CARA	M/L	WM 25610
CARA	XL	WM 25580
CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Full Face	L	WM 25650
CARA Full Face	XL	WM 25680

CE 0197



**Löwenstein Medical Technology**  
Kronsaalweg 40  
22525 Hamburg, Germany  
Т. +49 40 54702-0  
Ф. +49 40 54702-461  
info@loewensteinmedical.com

### Сбыт + сервисное обслуживание

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Germany  
Т. +49 2603 9600-0  
Ф. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com

