

# Instrucciones de limpieza

¿Cómo se limpia la mascarilla?

## Mascarillas nasales

Tiempo de uso de hasta 12 meses\*



CARA



JULIA



JOYCEone



JOYCEeasy

Material de las piezas  
de la mascarilla

A mano en agua tibia con  
detergente suave\*\*

Lavavajillas hasta  
a 70 °C

Plástico

Diariamente

Semanalmente

Silicona

Diariamente

Semanalmente

Textil

Semanalmente

-

# Mascarillas faciales

Tiempo de uso de hasta 12 meses\*



CARA Full Face



LENA



JOYCEone Full Face



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy next Full Face

Material de las piezas de la mascarilla	A mano en agua tibia con detergente suave**	Lavavajillas hasta a 70 °C
Plástico	Diariamente	Semanalmente
Codo con válvula de espiración de	Diariamente	-
Silicona	Diariamente	Semanalmente
Textil	Semanalmente	-

# Silentflow 3

Tiempo de uso de 6 a 12 meses\*

Componentes	A mano en agua tibia con detergente suave**	Lavavajillas hasta a 70 °C
Manguito de conexión	Semanalmente	Semanalmente
Pieza central	Semanalmente	Semanalmente

### Indicaciones generales:

Estas instrucciones breves no sustituyen a las instrucciones de uso de cada uno de los productos.

\* El tiempo de uso depende de la limpieza y del detergente utilizado, del período de utilización diario, de la presión de terapia y de la secreción individual de sudor. El uso de una segunda almohadilla de mascarilla (disponible opcionalmente) no prolonga el tiempo de uso.

\*\* Para la limpieza diaria recomendamos un detergente especial, p. ej., Löwosan.



En nuestro canal de YouTube encontrará instrucciones informativas, ejemplos de aplicación y consejos útiles:  
<https://www.youtube.com/@LoewensteinMedicalGlobal>

CE 0197



**Löwenstein Medical Technology**  
 Kronsaalsweg 40  
 22525 Hamburg, Alemania  
 T: +49 40 54702-0  
 F: +49 40 54702-461  
[info@loewensteinmedical.de](mailto:info@loewensteinmedical.de)

**Distribución y servicio**  
 Löwenstein Medical  
 Arzbacher Straße 80  
 56130 Bad Ems, Alemania  
 T. +49 2603 9600-0  
 F. +49 2603 9600-50  
[info@loewensteinmedical.com](mailto:info@loewensteinmedical.com)  
[loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

