

Consignes de nettoyage

Comment nettoyer mon masque ?

Masques nasaux

Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois*



CARA



JULIA



JOYCEone



JOYCEeasy

Matériaux des pièces
de masque

à la main dans de l'eau chaude
et du savon**

lave-vaisselle
jusqu'à 70 °C

Plastique

quotidien

hebdomadaire

Silicone

quotidien

hebdomadaire

Textile

hebdomadaire

-

Masques bucco-nasaux

Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois*



CARA Full Face



LENA



JOYCEone Full Face



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy next Full Face

Matériaux des pièces de masque	à la main dans de l'eau chaude et du savon**	lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
Plastique	quotidien	hebdomadaire
Raccord coudé avec valve d'expiration d'urgence	quotidien	-
Silicone	quotidien	hebdomadaire
Textile	hebdomadaire	-

Silentflow 3

Durée d'utilisation 6 à 12 mois*

Pièces	à la main dans de l'eau chaude et du savon**	lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
Raccord manchon	hebdomadaire	hebdomadaire
Partie centrale	hebdomadaire	hebdomadaire

Remarques générales :

Cette notice explicative ne remplace pas les modes d'emploi disponibles pour chaque produit.

* La durée d'utilisation dépend du nettoyage et du produit de nettoyage utilisé, de la durée de port quotidienne, de la pression thérapeutique et de la sécrétion de sueur individuelle. L'utilisation de la deuxième jupe du masque (fournie en option) ne prolonge pas la durée d'utilisation.

** Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons un détergent spécial, p. ex. Löwosan.



Sur notre canal YouTube, vous trouverez des instructions informatives, des exemples d'utilisation et de précieux conseils :
<https://www.youtube.com/@lowensteinmedicalfrance2545>

CE 0197



Maison mère
 Löwenstein Medical
 Kronsaalsweg 40
 22525 Hamburg, Germany
 T: +49 40 54702-0
 F: +49 40 54702-461
 info@loewensteinmedical.de

Ventes + Service
 Löwenstein Medical
 Arzbacher Straße 80
 56130 Bad Ems, Allemagne
 loewensteinmedical.com

Ventes + Service
 Löwenstein Medical Schweiz
 Seestrasse 14b
 5432 Neuenhof, Suisse
 T. +41 (0)56 4 16 41 26
 F. +41 (0)56 4 16 41 21
 info@loewensteinmedical.ch
 loewensteinmedical.com

Ventes + Service
 Löwenstein Médical France
 6, Rue de l'Aulnay-Dracourt
 91300 Massy, France
 T. +33 (0)1 69 35 53 20
 france@loewensteinmedical.com
 loewensteinmedical.com

