

Recommandations en matière d'hygiène

Sonata / Scala / Samoa



Article

Capteurs d'effort (coussinets de pression)
Modules principaux Sonata, Scala, Samoa
 (Protéger contre les contacts !)
Neuromodule Sonata
 (Protéger contre les contacts !)
Support de l'enregistreur patient
Support du neuromodule
Sonata Base
Câble de liaison Sonata/Scala vers Sonata base
Pochette à bandoulière

Désinfectant

mikroqid® universal wipes premium
 Schülke & Mayr GmbH



N° de commande : **109186**

Application

Désinfection par essuyage
 (Respecter le temps d'action)

S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans l'enregistreur, dans les connecteurs ou dans les raccords !
 Pour ce faire, utiliser les bouchons fournis dans le kit de nettoyage.

Article

Toutes les sangles
Thermistance
Câble Intercom Sonata
Câble USB pour le transfert de données vers un PC
Capteur de doigt SpO₂
Micro pour ronflements
Actimètre
Capteur de position externe
Câble de raccordement ECG

Désinfectant

mikroqid® AF wipes
 Schülke & Mayr GmbH



N° de commande : **109203**

Application

Désinfection par essuyage
 (Respecter le temps d'action)

S'assurer qu'aucun liquide ne pénètre dans l'enregistreur, dans les connecteurs ou dans les raccords !
 Pour ce faire, utiliser les bouchons fournis dans le kit de nettoyage.

* Des informations détaillées sont disponibles dans le plan d'hygiène du fabricant Dr. Fenyves und Gut Deutschland.

Made in Germany
 Dr. Fenyves und Gut Deutschland
 Daimlerstraße 23
 72414 Rangendingen, Allemagne

Ventes + Service
 Löwenstein Medical France
 6, Rue de l'Aulnaye-Dracourt
 91300 Massy, France
 T. +33 (0)1 69 35 53 20
 france@loewensteinmedical.com
 loewensteinmedical.com

Ventes + Service
 Löwenstein Medical Schweiz
 Seestrasse 14b
 5432 Neuenhof, Suisse
 T. +41 (0)56 4 16 41 26
 F. +41 (0)56 4 16 41 21
 info@loewensteinmedical.ch
 loewensteinmedical.com

Maison mère
 Löwenstein Medical
 Arzbacher Straße 80
 56130 Bad Ems, Allemagne
 loewensteinmedical.com

