

Consigli per l'igiene

## Sonata / Scala / Samoa



### Articolo

**Sensori di sforzo** (pad di pressione)

**Moduli principali Sonata, Scala, Samoa**

Proteggere i contatti.

**Modulo neurologico Sonata**

Proteggere i contatti.

**Guscio di supporto del registratore paziente**

**Guscio di supporto del modulo neurologico**

**Sonata Base**

**Cavo di collegamento Sonata / Scala per Sonata Base**

**Borsa con tracolla**

### Disinfettante

**mikrozyd® universal wipes premium**

Schülke & Mayr GmbH



N. ordine: **109186**

### Applicazione

**Disinfezione con salviette**

Rispettare i tempi d'esposizione.

Accertarsi che non entrino liquidi nel registratore o nei connettori a spina o nei collegamenti.

Per questa operazione utilizzare i tappi forniti in dotazione con il kit di pulizia.

### Articolo

**Tutte le cinghie**

**Termistore**

**Cavo Intercom Sonata**

**Cavo USB per la trasmissione dei dati al PC**

**Sensore a dito SpO<sub>2</sub>**

**Microfono per russamento**

**Actimetri**

**Sensore di posizione esterno**

**Cavo di collegamento ECG**

### Disinfettante

**mikrozyd® AF wipes**

Schülke & Mayr GmbH



N. ordine: **109203**

### Applicazione

**Disinfezione con salviette**

Rispettare i tempi d'esposizione.

Accertarsi che non entrino liquidi nel registratore o nei connettori a spina o nei collegamenti.

Per questa operazione utilizzare i tappi forniti in dotazione con il kit di pulizia.

\* Per informazioni dettagliate, consultare il piano d'igiene del produttore Dr. Fenyves und Gut Deutschland.

Made in  
Germany

  
Dr. Fenyves und Gut Deutschland  
Daimlerstraße 23  
72414 Rangendingen, Germania

**Sede centrale**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Germania  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com



 With people in mind

