


Isotherm Wärmestrahler Kurzanleitung

Bedienfeld

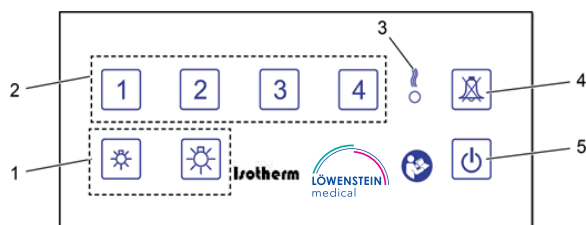

- (1) Tasten für LED-Leuchte
- (2) Tasten für Heizstufen
- (3) LED: Heizleistungsindikator
- (4) Taste für Alarmquittierung
- (5) EIN/AUS Taste

LED Beleuchtung



Wenn die LED-Beleuchtung ausgeschaltet ist:

- 1x drücken: LED schaltet auf heller Stufe ein (werkseitig 100 %).
- 1x drücken: LED schaltet wieder aus.



Wenn die LED-Beleuchtung eingeschaltet ist:

- 1x drücken: LED schaltet auf reduzierter Stufe ein (werkseitig 20 %).
- 1x drücken: LED schaltet wieder aus.

Alarmer quittieren


Nach dem Einschalten des Geräts auf einer Heizstufe größer als Stufe 1 wird nach 15 Minuten ein Erinnerungsalarm aktiviert. Der Erinnerungsalarm wird sowohl akustisch (Summer ertönt in 5 kurzen Intervallen) als auch optisch (Alarm-LED blinkt rot) angezeigt.



- Wird innerhalb von 8 Sekunden nach Beginn des Alarms die Alarmquittierungstaste gedrückt, wird der Alarm für die nächsten 15 Minuten ausgeschaltet und der Strahler heizt auf der vorgewählten Leistungsstufe weiter.
- Erfolgt innerhalb dieser 8 Sekunden keine Alarmquittierung wird die Heizleistung aus Sicherheitsgründen auf 20 % reduziert.

Isotherm Wärmestrahler Kurzanleitung

Bedienfeld

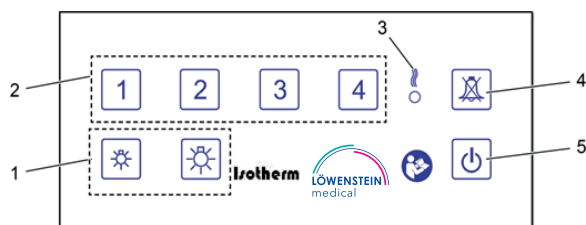

- (1) Tasten für LED-Leuchte
- (2) Tasten für Heizstufen
- (3) LED: Heizleistungsindikator
- (4) Taste für Alarmquittierung
- (5) EIN/AUS Taste

LED Beleuchtung



Wenn die LED-Beleuchtung ausgeschaltet ist:

- 1x drücken: LED schaltet auf heller Stufe ein (werkseitig 100 %).
- 1x drücken: LED schaltet wieder aus.



Wenn die LED-Beleuchtung eingeschaltet ist:

- 1x drücken: LED schaltet auf reduzierter Stufe ein (werkseitig 20 %).
- 1x drücken: LED schaltet wieder aus.


Alarmer quittieren

Nach dem Einschalten des Geräts auf einer Heizstufe größer als Stufe 1 wird nach 15 Minuten ein Erinnerungsalarm aktiviert. Der Erinnerungsalarm wird sowohl akustisch (Summer ertönt in 5 kurzen Intervallen) als auch optisch (Alarm-LED blinkt rot) angezeigt.



- Wird innerhalb von 8 Sekunden nach Beginn des Alarms die Alarmquittierungstaste gedrückt, wird der Alarm für die nächsten 15 Minuten ausgeschaltet und der Strahler heizt auf der vorgewählten Leistungsstufe weiter.
- Erfolgt innerhalb dieser 8 Sekunden keine Alarmquittierung wird die Heizleistung aus Sicherheitsgründen auf 20 % reduziert.

Einschalten

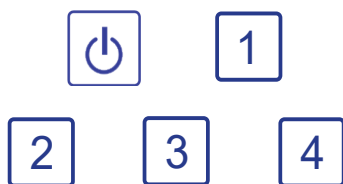

1. Schalten Sie die Heizung mit der EIN/AUS Taste ein.

Die Heizleistung wird zur Warmhaltung der Liegefläche automatisch auf die Heizstufe 1 (20 % Leistung) eingestellt. Die Liegefläche ist nach ca. 5-10 Minuten vorgewärmt.

2. Wählen Sie die gewünschte Heizstufe durch Tastendruck direkt an.

- Stufe 2: 50 % Leistung
- Stufe 3: 75 % Leistung
- Stufe 4: 98 % Leistung

Heizstufen

- 1** Stufe 1: 20 %
Anwendungsbeispiele:
 - Vorwärmung oder Warmhaltung der Liegefläche
 - Dauerbetrieb
- 2** Stufe 2: 50 %
Anwendungsbeispiele:
 - Normalbetrieb
 - Wickel- oder Untersuchungsplatz
- 3** Stufe 3: 75 %
Anwendungsbeispiele:
 - Zusätzliche Wärme bei Reanimation, im Gebärsaal oder OP
- 4** Stufe 4: 98 %
Anwendungsbeispiele:
 - Erhöhten Wärmebedarf im OP, bei der Anästhesie oder bei Erwachsenen

Ausschalten

- 1.** Schalten Sie den Strahler mit der grünen EIN/AUS Taste in den Standby-Betrieb.

Nachdem die Steuerung vorgängig mit der EIN/AUS Taste auf der Front in den Standby-Betrieb geschaltet worden ist, kann das Gerät mit dem Hauptschalter auf der Rückseite vollständig ausgeschaltet werden.



Vorsicht

Diese Kurzanleitung ist lediglich ein Auszug aus der Bedienungsanleitung und ersetzt diese nicht. Lassen Sie sich die Bedienungsanleitung aushändigen und lesen Sie diese aufmerksam durch.




Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems
Deutschland
T: +49 2603 9600-0
F: +49 2603 9600-50
info@hul.de, www.hul.de

CE 0197



gsm 1045302z 103

Einschalten

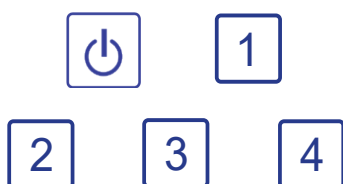

1. Schalten Sie die Heizung mit der EIN/AUS Taste ein.

Die Heizleistung wird zur Warmhaltung der Liegefläche automatisch auf die Heizstufe 1 (20 % Leistung) eingestellt. Die Liegefläche ist nach ca. 5-10 Minuten vorgewärmt.

2. Wählen Sie die gewünschte Heizstufe durch Tastendruck direkt an.

- Stufe 2: 50 % Leistung
- Stufe 3: 75 % Leistung
- Stufe 4: 98 % Leistung

Heizstufen

- 1** Stufe 1: 20 %
Anwendungsbeispiele:
 - Vorwärmung oder Warmhaltung der Liegefläche
 - Dauerbetrieb
- 2** Stufe 2: 50 %
Anwendungsbeispiele:
 - Normalbetrieb
 - Wickel- oder Untersuchungsplatz
- 3** Stufe 3: 75 %
Anwendungsbeispiele:
 - Zusätzliche Wärme bei Reanimation, im Gebärsaal oder OP
- 4** Stufe 4: 98 %
Anwendungsbeispiele:
 - Erhöhten Wärmebedarf im OP, bei der Anästhesie oder bei Erwachsenen

Ausschalten

- 1.** Schalten Sie den Strahler mit der grünen EIN/AUS Taste in den Standby-Betrieb.

Nachdem die Steuerung vorgängig mit der EIN/AUS Taste auf der Front in den Standby-Betrieb geschaltet worden ist, kann das Gerät mit dem Hauptschalter auf der Rückseite vollständig ausgeschaltet werden.



Vorsicht

Diese Kurzanleitung ist lediglich ein Auszug aus der Bedienungsanleitung und ersetzt diese nicht. Lassen Sie sich die Bedienungsanleitung aushändigen und lesen Sie diese aufmerksam durch.



Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80, 56130 Bad Ems
Deutschland
T: +49 2603 9600-0
F: +49 2603 9600-50
info@hul.de, www.hul.de

CE 0197



gsm 1045302z 103