

# Samoa

Polygraphe.

Smart, Simple & Small.

Appareil de base déjà raccordé aux lunettes nasales et à la ceinture thoracique qui maintient Samoa.



- 1 Samoa avec ceinture thoracique
- 2 Lunettes nasales
- 3 Ceinture abdominale
- 4 Capteur de doigt
- 5 Bande auto-agrippante pour capteur de doigt

En savoir plus sur Samoa :



## LÖWENSTEIN medical

### Maison mère

Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Allemagne  
loewensteinmedical.com

### Ventes + Service

Löwenstein Medical Schweiz  
Seestrasse 14b  
5432 Neuenhof, Suisse  
T. +41 (0)56 4 16 41 26  
F. +41 (0)56 4 16 41 21  
info@loewensteinmedical.ch  
loewensteinmedical.com

### Ventes + Service

Löwenstein Medical France  
6, Rue de l'Aulnaye-Dracourt  
91300 Massy, France  
T. +33 (0)1 69 35 53 20  
france@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com



Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH  
Daimlerstr. 23  
72414 Rangendingen, Allemagne



© Protégé par le droit d'auteur. Toute forme de reproduction est soumise à l'autorisation expresse préalable de Löwenstein.

Guide rapide pour les patients

# Samoa

Polygraphe

Chère patiente,  
Cher patient,

Votre spécialiste vous a confié un polygraphe qui vous permettra de diagnostiquer à domicile les troubles respiratoires du sommeil dont vous pourriez souffrir.

Le présent guide vous expliquera rapidement comment appliquer l'appareil correctement. S'il est mal posé, le polygraphe Samoa ne pourra pas effectuer les enregistrements escomptés.



## Comment s'équiper du polygraphe Samoa



1. Placez l'appareil par-dessus le tee shirt en fixant la ceinture thoracique sous les aisselles. La ceinture du Samoa doit être serrée, mais ne pas gêner la respiration pour que les capteurs fonctionnent en toute fiabilité.






2. Placez la ceinture abdominale autour du ventre. Le capteur de pression doit être à l'intérieur de la ceinture.



3. Vissez le raccord noir de la ceinture abdominale d'environ un demi-tour sur l'embout noir sous l'appareil.



4. Posez le capteur de doigt de préférence sur l'annulaire ; si nécessaire, coupez l'ongle ou enlevez le vernis à ongles au préalable. Enfoncez le doigt dans le capteur de façon que le câble passe sur le dessus de la main. Fixez le câble au poignet avec la bande auto-agrippante.

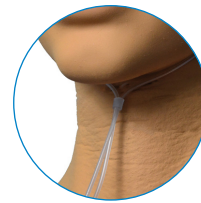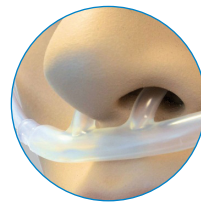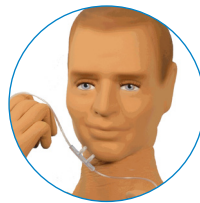



5. Placez les lunettes nasales dans vos narines. Passez les tuyaux derrière vos oreilles. Ils doivent ensuite se rejoindre sous le menton, où ils sont fixés par un anneau en plastique.



6. Si la canule nasale n'est pas encore branchée : vissez la canule nasale sur l'embout blanc libre sous l'appareil.

### Contrôle du traitement


Dans le cadre de contrôles de traitement, l'adaptateur en T est inséré entre le tuyau et le masque. Visser le tuyau de l'adaptateur en T sur l'embout blanc libre sous l'appareil. **Cette opération se fait sans lunettes nasales !**

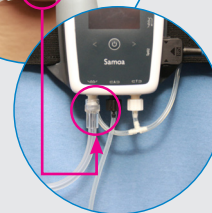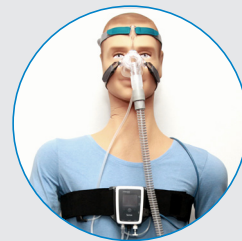

## Démarrer l'enregistrement


### Démarrage automatique

L'enregistrement démarre et s'arrête automatiquement aux horaires définis chez votre spécialiste.

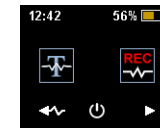

### Démarrage manuel

Pour démarrer un enregistrement manuel, appuyez sur le bouton Marche (⏻) pendant env. 2 secondes jusqu'à ce que l'écran s'active et passe à l'image suivante.

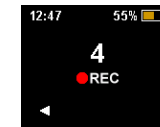

Appuyez sur la flèche à droite (➡) : la mesure démarre après un compte à rebours de 5 à 0. Pendant l'enregistrement, un point rouge clignote sur l'écran.

## Arrêter l'enregistrement

L'appareil stoppe l'enregistrement automatiquement, vous n'avez rien à faire.

Le lendemain matin, une fois l'enregistrement terminé, rangez toutes les pièces dans le sac et rappez l'ensemble chez votre spécialiste.

**Important : pour des raisons d'hygiène, nous vous demandons de placer les lunettes nasales dans un sachet séparé.**