

Samoa

Apparecchio poligrafico. Smart, Simple & Small.

Apparecchio base con cinghia toracica già collegata per fissare Samoa al corpo e cannula nasale anch'essa già collegata.



- 1 Samoa con cinghia toracica
- 2 Cannula nasale
- 3 Cinghia addominale
- 4 Sensore pulsossimetro
- 5 Chiusura in velcro per sensore

Per maggiori informazioni su Samoa:



LÖWENSTEIN medical

Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com

loewensteinmedical.com



 Dr. Fenyves und Gut Deutschland GmbH
Daimlerstr. 23
72414 Rangendingen, Deutschland



Guida rapida per i pazienti

Samoa

Apparecchio poligrafico

Gentile paziente,

il Suo medico Le ha consegnato un dispositivo per la diagnosi di un eventuale disturbo respiratorio nel sonno da utilizzare a casa. Questa guida ha lo scopo di illustrarle brevemente come indossare il dispositivo. L'applicazione corretta di Samoa è fondamentale per una corretta registrazione.



© Il presente documento è protetto da diritto d'autore. La riproduzione con qualsiasi mezzo è consentita solo previa esplicita approvazione di Löwenstein.

Come si applica un apparecchio poligrafico?



1. Applicare l'apparecchio sopra la maglietta e sotto alle ascelle. Samoa dovrebbe aderire bene, ma comodamente al corpo. Solo così i sensori funzionano in modo affidabile.




2. Applicare la cinghia addominale all'altezza dei fianchi. Il sensore di pressione deve trovarsi nella parte interna della cinghia.



3. Avvitare di circa un mezzo giro il connettore nero della cinghia addominale sul supporto nero presente sul lato inferiore dell'apparecchio.



4. Applicare il sensore a dito preferibilmente sull'anulare, se possibile dopo aver tagliato le unghie e aver rimosso eventuale smalto per unghie. Infilare il dito nel cappuccio grigio del sensore in modo che il cavo passi lungo il dorso della mano. Fissare il cavo al polso con la chiusura in velcro.

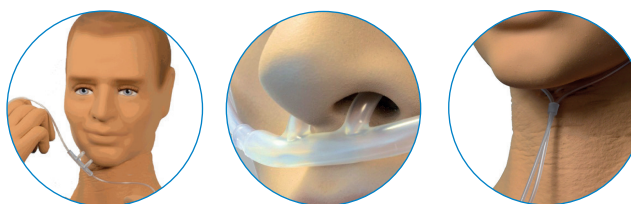


5. Applicare ora la cannula nasale, inserendo le due punte nelle narici. I tubi flessibili devono passare dietro alle orecchie ed essere fissati sotto al mento con l'anelletto di plastica.



6. Se la cannula nasale non è ancora collegata: Avvitare il connettore sul supporto bianco libero presente sul lato inferiore dell'apparecchio.

Monitoraggio della terapia


Per il monitoraggio durante la terapia ventilatoria, fissare l'adattatore a T tra il tubo flessibile e la maschera. Avvitare il tubo flessibile dell'adattatore a T sul supporto bianco libero presente sul lato inferiore dell'apparecchio. **La cannula nasale non serve!**

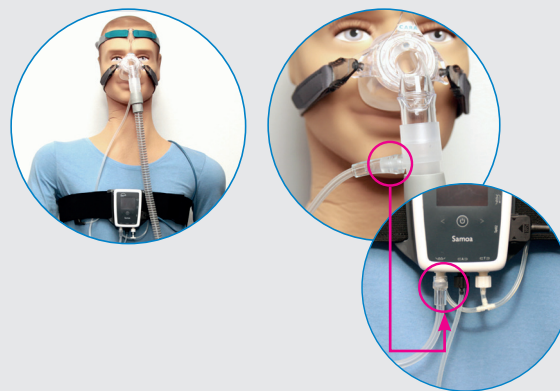

Avvio della registrazione


Avvio automatico

La registrazione si avvia e si arresta automaticamente in base agli orari impostati dal medico.

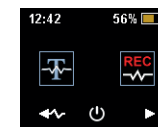

Avvio manuale

Per avviare manualmente una registrazione premere il tasto di avvio (power icon) per ca. 2 secondi fino all'accensione del display e alla comparsa della schermata seguente.

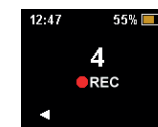

Premendo il tasto freccia a destra (right arrow) la misurazione si avvia dopo il conto alla rovescia da 5 a 0. Durante la registrazione sul display compare un punto rosso.

Arresto della registrazione

L'apparecchio porta a termine la misurazione automaticamente, l'utilizzatore non deve fare **nulla**.

Il mattino successivo, al termine della registrazione, riporre tutti i componenti nella custodia e restituire la custodia completa allo studio medico.

Importante: per motivi igienici riporre per prima cosa la cannula nasale in una busta a parte!