Kurzanleitung – Offline Messung – Initialisierung

LÖWENSTEIN medical

Sonata

Polysomnographie



1. Vorbereitung

Verbinden Sie Sonata per USB Anschlusskabel mit dem PC.



2. Aufzeichnung starten





Öffnen Sie die MiniScreen Viewer Software per Doppelklick auf das **MSV** Symbol auf dem Desktop.

2.3



Füllen Sie die Maske mit den Stammdaten des Patienten. Wählen Sie anschließend **Übertragung starten**.

D 👔	er Speicher wu	urde noch n	icht ausgelesen.	
S S	oll er trotzdem	formatiert	werden?	
		Ν		

Achtung sicherstellen, dass alle Daten vom Gerät ausgelesen wurden. Diese Meldung mit Ja bestätigen.



2.2 Aufzeichnen Messung Auswerten Gerät initialisieren (Offline)... Aufnahme starten (Online)... Messung einlesen... Signaltest...

Wählen Sie unter **Aufzeichnen > Gerät initialisieren (Offline)** oder klicken Sie auf das Symbol 💮 in der Menüleiste oder auf dem Dashboard.

and the second		
	Verbindung hergestellt!	

Die Verbindung zu Sonata wird aufgebaut.

2.6

Wählen Sie ggf. ein neues Kanalset (Kanalset laden) aus.

2.8

2.4



Wählen Sie die gewünschte Halteposition des Haupt- und Neuromoduls (V-Form oder Waagerecht) aus.

Wählen Sie das gewünschte Kanalset aus der Liste aus.

2.9.

2.1

Sie haben die Möglichkeit das Gerät für einen **automatischen** (programmierten) oder **manuellen** Start zu initialisieren.

Programmierter Start:Weiter mit 2.10.1Manueller Start:Weiter mit 2.11.1

2.10. Programmierter Start

Aufzeichnungsbeginn:	Durchzuführende Messungen:
Uhrzeit: Dabum:	Wochentag Messbeginn Daue
Autzeichnungsdauer 8 Stunden 0 Minuten	inzufügen
	Messung entfernen

Legen Sie Aufzeichnungsbeginn und –dauer fest und klicken Sie anschließend auf **Messung hinzufügen**. Im rechten Fenster wird die programmierte Messung angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK**.

2.11. Manueller Start



Bestätigen Sie den Dialog mit **OK**.

Aufzeichnungsbeginn:	Durchzuführende	Messungen	
Uhrazé Dature 2250 (* 050.2020 * Arateichnungsdaum 5 (* 5 varden 0 (* Manden	Wothentag	Messbeginn	Dauer
	× Messung	entfernen	

2 10 2	rev Information	
2.10.2	Das Sonata wurde initia	lisiert.
	Nachname:	Nachname
	Vorname:	Vorname
	Gewähltes Kanalset:	2_EEG_Diagnosis_Cannula_Thermistor*
	Ladezustand Akku:	100%
	Aufzeichnungsbeginn:	03.01.2020 22:00
	Aufzeichnungsdauer:	08 Stunden 00 Minuten
	Der automatische Aufze	ichnungsbeginn wurde erfolgreich übertragen.
	Das Sonata kann nun d	em Patienten mitgegeben werden.
	OK	

Es erscheint die folgende Messung zur Kontrolle. Bestätigen Sie mit **OK**. Das Gerät beginnt zum programmierten Zeitpunkt automatisch zu messen.

Das Sonata wurde initial	isiert.
Nachname:	Nachname
Vorname:	Vorname
Gewähltes Kanalset:	2_EEG_Diagnosis_Cannula_Thermistor*
Ladezustand Akku:	100%
Aufzeichnungsbeginn:	03.01.2020 22:00
Aufzeichnungsdauer:	08 Stunden 00 Minuten
Der automatische Aufzeit	thnungsbeginn wurde erfolgreich übertragen.
Das Sonata kann nun de	m Patienten mitgegeben werden.

Es erscheint die folgende Meldung zur Kontrolle. Bestätigen Sie diese mit **OK**.



Um die Messung manuell zu starten, schaltet der Patient Sonata zum entsprechenden Zeitpunkt durch Drücken auf die Ein/Aus Taste (2 Sekunden) ein. Eine laufende Messung wird mit einer blinkenden grünen LED im 4 Sekunden Rhytmus angezeigt.

3. Messung einlesen

Verbinden Sie Sonata per USB Anschlusskabel mit dem PC – siehe 1. Vorbereitung.



Menschen im Mittelpunkt



lĭm