

Aufzeichnungsstart/-stopp

Sonata

Polysomnographiegerät



1. Vorbereitung

Verkabeln Sie den Patienten.

A Messung mit Kabel



Verbinden Sie das Anschlusskabel mit Sonata.

B Messung mit WLAN



Schalten Sie Sonata mittels der EIN/AUS Taste auf der Sonata ein.


2. Aufzeichnung starten

2.1



Öffnen Sie die MiniScreen Viewer Software per Doppelklick auf das **MSV** Symbol auf dem Desktop.

2.2

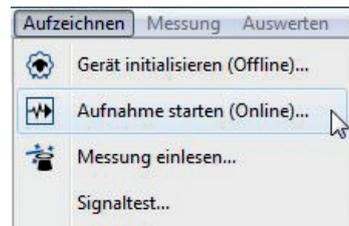

Wählen Sie unter **Aufzeichnen > Aufnahme starten (Online)** oder klicken Sie auf das Symbol  in der Menüleiste oder auf dem Dashboard.

2.3


Füllen Sie die Maske mit den Stammdaten des Patienten. Wählen Sie anschließend **Übertragung starten**.

2.4




Die Verbindung zu Sonata wird aufgebaut.

2.5

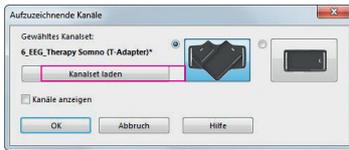


Um eine Konfiguration auszuwählen klicken, Sie auf **Kanalset laden**.

2.6

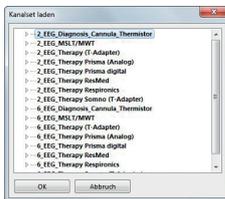

Das gewünschte Kanalset aus der Liste auswählen und mit **OK** bestätigen.


2.7

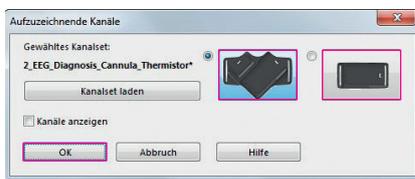

Legen Sie Aufzeichnungsbeginn und –dauer fest und klicken Sie anschließend auf **Messung hinzufügen**. Im rechten Fenster wird die programmierte Messung angezeigt. Bestätigen Sie mit **OK**.

3. Aufzeichnung beenden

3.1

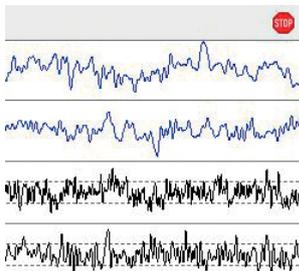

Beenden Sie die Aufzeichnung über das **Stopp-Zeichen** rechts oben in der Ecke.

3.2



Bestätigen Sie die Frage mit **Ja**.

Wichtig: Nach dem Beenden der Messung Sonata mit dem Kabel verbinden, um den Akku wieder aufzuladen.
Für eine Messung muss der Akku geladen sein, sonst ist keine Messung möglich.



Dr. Fenyves und Gut Deutschland
Daimlerstraße 23
72414 Rangendingen, Deutschland

Vertrieb + Service
Löwenstein Medical
Arzbacher Straße 80
56130 Bad Ems, Deutschland
T. +49 2603 9600-0
F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

