


**LÖWENSTEIN**  
medical

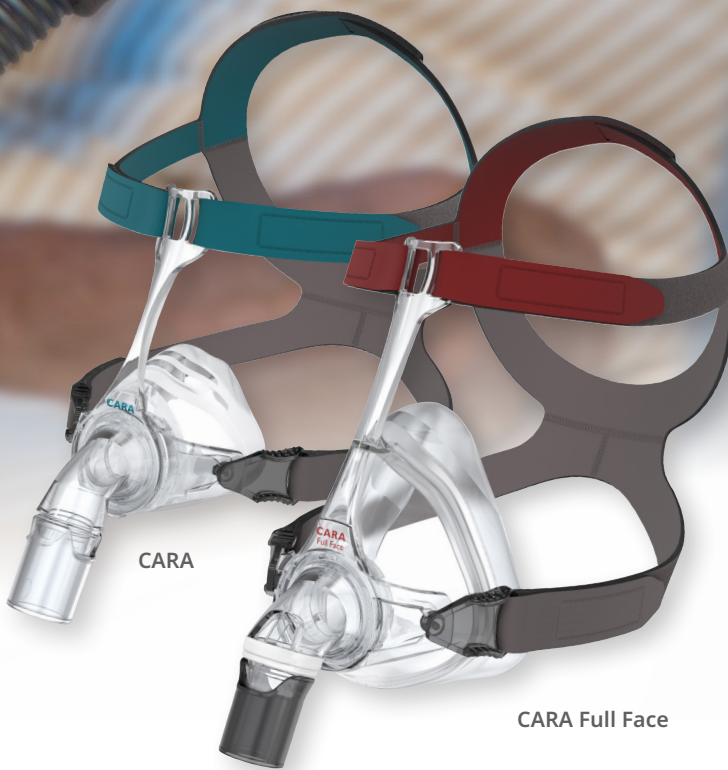

# CARA

—  
Un sueño excelente.

 With people in mind

# CARA

## Un sueño excelente.

Ajuste perfecto, gran comodidad de uso, espiración agradable y silenciosa y buena tolerancia en la piel: las mascarillas nasales y faciales de la familia CARA cumplen estos requisitos a la perfección de forma moderna. Nuestras exitosas mascarillas CARA impresionan por su ligereza, su almohadilla suave y ajustada, sus buenas opciones de ajuste y otros detalles inteligentes. CARA ofrece la solución adecuada para casi todos los usuarios de mascarillas.

### Almohadilla de mascarilla: ajuste perfecto y estabilidad

La primera impresión es la que cuenta. La almohadilla de la mascarilla es suave, flexible y cómoda. Además, se asienta de manera estable en la cara y se adapta con precisión a los contornos respectivos, lo que resulta ideal para una comodidad de uso prolongada, incluso sin almohadilla frontal.

### Perfeccionar lo probado

El sistema de espiración en forma de ranura cerca de la articulación de rótula ha demostrado su eficacia durante décadas. La familia CARA lo ha perfeccionado. Un número reducido de piezas facilita el manejo, reduce el peso y contribuye a conservar el medio ambiente al minimizar la producción y eliminación de materiales.

El flujo de salida difuso se mantiene para no molestar al paciente ni al compañero de cama, y la zona superior cerrada impide que el aire fluya hacia los ojos.

### CARA ha sido galardonada

CARA no solo le ha impresionado a usted, también ha ganado premios de diseño reconocidos internacionalmente, como el Focus Open y el German Design Award.



Focus Open 2018  
Special Mention  
BADEN-WÜRTTEMBERG  
INTERNATIONAL DESIGN AWARD

## Sencilla colocación.



1  
Separe los dos clips de la mascarilla.



2  
Deslice el arnés sobre la cabeza.



3  
Fije los clips en la parte inferior de la mascarilla.



4  
Ajuste las cintas superiores del arnés, tan flojas como sea posible y tan apretadas como sea necesario.

Ahora también disponible en **XL**

Arnés para la cabeza codificadas por colores: zona de color (petróleo o vino) en la parte superior

Suave y cómoda almohadilla de mascarilla, en 4 tamaños

Cordón de liberación para desmontaje rápido

Material extremadamente resistente

Elección entre enhebrar o fijar

Sistema de espiración silencioso y difuso

Rótula con rotación de 360° y 3D para una libertad de movimiento ilimitada



Ajuste también las cintas inferiores del arnés. Recuerde: tan flojas como sea posible y tan apretadas como sea necesario.



Ajuste las cintas del arnés de modo que la parte inferior no choque con los lóbulos de las orejas.



Ajustar el soporte frontal lo más suelto posible, no tiene que estar apretado.



En YouTube encontrará nuestro vídeo para el usuario.

## Piezas de repuesto



### Arnés CARA

incluidos los clips

XS: WM 25191

Estándar: WM 25192



### Arnés CARA Full Face

incluidos los clips

WM 25243



### Arnés XL

CARA/CARA Full Face

sin clips

WM 25338



### Almohadilla de mascarilla CARA

XS: WM 25189

S/M: WM 25238

M/L: WM 25239

XL: WM 25576



### Almohadilla de mascarilla CARA Full Face

S: WM 25601

M: WM 25602

L: WM 25603

XL: WM 25676



### Cordón de liberación rápida CARA Full Face

WM 25623

Hallará más información sobre nuestras soluciones terapéuticas, accesorios y sistemas de mascarillas en [loewensteinmedical.com](http://loewensteinmedical.com)

## Datos técnicos

	CARA	CARA Full Face		CARA	CARA Full Face
Clase de producto según reglamento MDR (UE) 2017/745	II a	II a	Resistencia al flujo		
Dimensiones (An x Al x P)	72 x 112 x 70 mm (tamaño XS) 72 x 117 x 70 mm (tamaño S/M) 72 x 118 x 70 mm (tamaño M/L) 70 x 125 x 75 mm (tamaño XL)	93 x 145 x 89 mm (tamaño S) 93 x 160 x 90 mm (tamaño M) 93 x 174 x 91 mm (tamaño L) 96 x 185 x 100 mm (tamaño XL)	• a 50 l/min • a 100 l/min	0,2 hPa 0,9 hPa	0,12 hPa 0,5 hPa
Peso	58 g (tamaño XS) 59 g (tamaño S/M) 60g (tamaño M/L) 69 g (tamaño XL)	93 g (tamaño S) 97 g (tamaño M) 102g (tamaño L) 109 g (tamaño XL)	Resistencia al flujo válvula de espiración de emergencia tolerancia: ±1 hPa		
Volumen de espacio muerto	74 ml (tamaño XS) 76 ml (tamaño S/M) 79 ml (tamaño M/L) 98 ml (tamaño XL)	180 ml (tamaño S) 219 ml (tamaño M) 244 ml (tamaño L) 291 ml (tamaño XL)	• Inspiración a 50 l/min • Espiración a 50 l/min	- -	0,6 hPa 0,8 hPa
Margen de presión de terapia	4 hPa - 30 hPa	4 hPa - 25 hPa	Presión de conmutación válvula de espiración de emergencia		
Conexión de tubo flexible: cono según EN ISO 5356-1	Ø 22 mm (macho)	Ø 22 mm (macho)	• Abrir: • Cerrar:	- -	0,5 hPa 2,2 hPa
Margen de temperatura			Valor indicado de emisión, de ruidos, dos cifras, según ISO 4871:		
• Funcionamiento	de +5 °C a +40 °C	de +5 °C a +40 °C	• Nivel de intensidad acústica:	18 dB (A)	19 dB (A)
• Almacenamiento y transporte	de -20 °C a +70 °C	de -20 °C a +70 °C	• Nivel de potencia acústica:	26 dB (A)	27 dB (A)
			• Factor de incertidumbre:	3 dB (A)	3 dB (A)
			Vida útil	5 años	5 años
			Tiempo de uso	Hasta 12 meses <sup>1</sup>	Hasta 12 meses <sup>1</sup>
			Normas aplicadas	EN ISO 17510: 2020	EN ISO 17510: 2020

<sup>1</sup> El tiempo de uso depende de la limpieza y del detergente utilizado, del período de utilización diario, de la presión de terapia y de la secreción individual de sudor. El uso de una segunda almohadilla de mascarilla (disponible opcionalmente) no prolonga el tiempo de uso.

## Denominación del aparato T. N.º de artículo

CARA	XS	WM 25590
CARA	S/M	WM 25600
CARA	M/L	WM 25610
CARA	XL	WM 25580
CARA Full Face	S	WM 25630
CARA Full Face	M	WM 25640
CARA Full Face	L	WM 25650
CARA Full Face	XL	WM 25680

CE 0197



**Löwenstein Medical Technology**  
Kronsaalsweg 40  
22525 Hamburgo, Alemania  
T. +49 40 54702-0  
F. +49 40 54702-461  
info@loewensteinmedical.com

**Distribución y servicio**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Alemania  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com

