

**LÖWENSTEIN**  
medical



# JOYCEclinic Full Face

Maschera Single Patient Use

# JOYCEclinic Full Face

## La semplicità senza scendere a compromessi.

La **maschera Full Face Single Patient Use** (maschera integrale riservata ad un unico paziente) è destinata alla ventilazione acuta non invasiva e garantisce la consueta qualità elevata di Löwenstein Medical.

JOYCEclinic Full Face consente allo stesso tempo un **adattamento della maschera rapido e semplice** e una **stabilità sicura e comoda** anche alle pressioni fino a 50 hPa.

Le cinghie per il fissaggio alla testa, che risultano stabili anche alle pressioni elevate, consentono lo sgancio in modo veloce e semplice in caso d'emergenza grazie ad un **cordino di rilascio chiaramente riconoscibile**.

Le contaminazioni crociate non si verificano grazie alla caratteristica **Single Patient Use**.

Nessun compromesso quindi, neanche per le cliniche, nonostante la pressione dei costi.

- Nessuna contaminazione crociata
- Cuscinetto della maschera e cinghie resistenti alla pressione
- Cordino di rilascio

Grazie ai 4 diversi adattatori ad angolo intercambiabili, è possibile trovare la variante di maschera adattata ad ogni situazione e ad ogni combinazione di dispositivi.

**JOYCEclinic Full Face** è disponibile preassemblato in **3 taglie** nelle varianti **non ventilata, non ventilata con AAV e ventilata con AAV**. La sagoma consente di stabilire in modo sicuro e veloce la taglia corretta anche senza toccare la maschera grazie al sacchetto a doppia camera.

L'**adattatore endoscopico** è un pratico accessorio che consente di effettuare la broncoscopia senza interrompere la ventilazione.

I raccordi NV, NV+AVV e ventilati sono disponibili anche come **pezzi di ricambio sostituibili in modo semplice**.

Tutte le maschere sono disponibili anche come set di 10 maschere senza sacchetto a doppia camera. Il set è corredato dalle istruzioni per l'uso e da una sagoma per individuare la taglia giusta.

- 3 taglie
- 4 raccordi intercambiabili
- Sagoma
- Sacchetto a doppia camera
- Maschera singola o set da 10 pz.



## Adattatore ad angolo

Grazie a una leva sull'anello di bloccaggio è possibile sganciare in modo semplice e sostituire rapidamente i raccordi in ogni momento.



NV senza AAV\*



NV con AAV\*



V con AAV\*



Adattatore endoscopico

## Adattatore del giunto rotante

Utilizzando l'adattatore del giunto rotante integrato in tutte le varianti ventilate, è possibile utilizzare anche un tubo flessibile CPAP.


Adattatore del giunto rotante




\*AAV = Valvola antiasfissia (valvola di respirazione di emergenza)

## Casi d'applicazione dei raccordi


### Raccordo NV

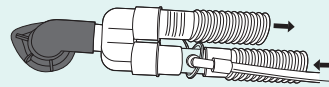

- Circuito doppio con inspirazione ed espirazione separate e con valvola di espirazione sul lato dispositivo

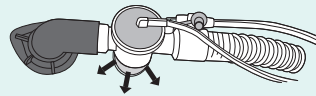


- Circuito singolo con valvola di espirazione al letto del paziente

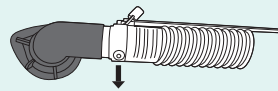


- Circuito singolo con dispersione dell'espirazione

### Raccordi NV e AAV

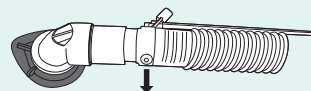


- Circuito singolo con dispersione dell'espirazione e sicurezza aggiuntiva in caso di avaria del dispositivo (valvola antiasfissia)
- Combinazione standard per ventilatori dotati di sistema con perdite

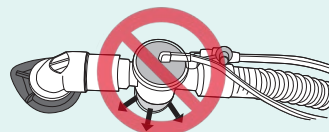

- Non è consentito utilizzare il circuito singolo con valvola di espirazione al letto del paziente.
- La portata non è tanto elevata da mantenere aperta la valvola di espirazione d'emergenza.

### Raccordo ventilato

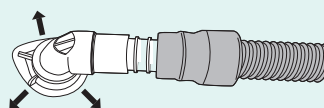

- Adattatore e tubo flessibile CPAP per l'impiego dei ventilatori prisma VENT o simili



# JOYCEclinic Full Face



## Informazioni per gli ordini

Articolo 1 pz. per confezione	Codice articolo	Articolo 10 pz. per confezione	Codice articolo
<b>JOYCEclinic Full Face NV</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taglia S</li><li>• Taglia M</li><li>• Taglia L</li></ul>	WM 26805 WM 26815 WM 26825	<b>JOYCEclinic Full Face NV</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taglia S</li><li>• Taglia M</li><li>• Taglia L</li></ul>	WM 26857 WM 26858 WM 26859
<b>JOYCEclinic Full Face NV + AAV</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taglia S</li><li>• Taglia M</li><li>• Taglia L</li></ul>	WM 26845 WM 26855 WM 26865	<b>JOYCEclinic Full Face NV + AAV</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taglia S</li><li>• Taglia M</li><li>• Taglia L</li></ul>	WM 26869 WM 26870 WM 26871
<b>JOYCEclinic Full Face vented</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taglia S</li><li>• Taglia M</li><li>• Taglia L</li></ul>	WM 26840 WM 26850 WM 26860	<b>JOYCEclinic Full Face vented</b> <ul style="list-style-type: none"><li>• Taglia S</li><li>• Taglia M</li><li>• Taglia L</li></ul>	WM 26866 WM 26867 WM 26868

## Accessori

Adattatore endoscopico WM 15864

## Pezzi di ricambio

Raccordo NV	WM 25269	Cinghie per fissaggio alla testa JOYCEclinic Full Face (5 pz.)	WM 26835
Raccordi NV+AAV	WM 26834	Adattatore del giunto rotante*	WM 26916
Raccordo ventilato	WM 26833		

\* Prodotto compreso nella dotazione della variante ventilata

## Dati tecnici

Categoria del prodotto ai sensi della direttiva 93/42/CEE	IIa	Intervallo della pressione terapeutica	4 hPa – 50 hPa
Raccordo del tubo flessibile a forma conica ai sensi di EN ISO 5356-1	22 mm (femmina)	Spazio morto geometrico	
		Taglia S	225 ml
		Taglia M	255 ml
		Taglia L	305 ml

CE 0197

Made in  
Germany

  
Löwenstein Medical Technology  
Kronsaalweg 40  
22525 Hamburg, Germania

**Sede centrale**  
Löwenstein Medical  
Arzbacher Straße 80  
56130 Bad Ems, Germania  
T. +49 2603 9600-0  
F. +49 2603 9600-50  
info@loewensteinmedical.com  
loewensteinmedical.com



 With people in mind

