

Instrucciones de limpieza

¿Cómo se limpia la mascarilla?



Mascarillas nasales

Tiempo de uso de hasta 12 meses*



CARA



JULIA



JOYCEone



JOYCEeasy

Material de las piezas de la mascarilla

A mano en agua tibia con detergente suave**

Lavavajillas hasta a 70 °C

Plástico

Diariamente

Semanalmente

Silicona

Diariamente

Semanalmente

Textil

Semanalmente

-

Mascarillas faciales

Tiempo de uso de hasta 12 meses*



CARA Full Face



LENA



JOYCEone Full Face



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy next Full Face

Material de las piezas de la mascarilla	A mano en agua tibia con detergente suave**	Lavavajillas hasta a 70 °C
Plástico	Diariamente	Semanalmente
Codo con válvula de espiración de	Diariamente	-
Silicona	Diariamente	Semanalmente
Textil	Semanalmente	-

Silentflow 3

Tiempo de uso de 6 a 12 meses*

Componentes	A mano en agua tibia con detergente suave**	Lavavajillas hasta a 70 °C
Manguito de conexión	Semanalmente	Semanalmente
Pieza central	Semanalmente	Semanalmente

Indicaciones generales:

Estas instrucciones breves no sustituyen a las instrucciones de uso de cada uno de los productos.

* El tiempo de uso depende de la limpieza y del detergente utilizado, del período de utilización diario, de la presión de terapia y de la secreción individual de sudor. El uso de una segunda almohadilla de mascarilla (disponible opcionalmente) no prolonga el tiempo de uso.

** Para la limpieza diaria recomendamos un detergente especial, p. ej., Löwosan.



En nuestro canal de YouTube encontrará instrucciones informativas, ejemplos de aplicación y consejos útiles:
<https://www.youtube.com/@LoewensteinMedicalGlobal>

CE 0197



Löwenstein Medical Technology
 Kronsaaßweg 40
 22525 Hamburg, Alemania
 T: +49 40 54702-0
 F: +49 40 54702-461
info@loewensteinmedical.de

Distribución y servicio
 Löwenstein Medical
 Arzbacher Straße 80
 56130 Bad Ems, Alemania
 T. +49 2603 9600-0
 F. +49 2603 9600-50
info@loewensteinmedical.com
loewensteinmedical.com

