

# Consignes de nettoyage

Comment nettoyer mon masque?



## Masques nasaux

Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois\*



CARA



JULIA



JOYCEone



JOYCEeasy

Matériaux des pièces  
de masque

à la main dans de l'eau chaude  
et du savon\*\*

lave-vaisselle  
jusqu'à 70 °C

Plastique

quotidien

hebdomadaire

Silicone

quotidien

hebdomadaire

Textile

hebdomadaire

-

# Masques bucco-nasaux

Durée d'utilisation jusqu'à 12 mois\*



CARA Full Face



LENA



JOYCEone Full Face



JOYCEeasy Full Face



JOYCEeasy next Full Face

Matériaux des pièces de masque	à la main dans de l'eau chaude et du savon**	lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
Plastique	quotidien	hebdomadaire
Raccord coudé avec valve d'expiration d'urgence	quotidien	-
Silicone	quotidien	hebdomadaire
Textile	hebdomadaire	-

## Silentflow 3

Durée d'utilisation 6 à 12 mois\*

Pièces	à la main dans de l'eau chaude et du savon**	lave-vaisselle jusqu'à 70 °C
Raccord manchon	hebdomadaire	hebdomadaire
Partie centrale	hebdomadaire	hebdomadaire

### Remarques générales :

Cette notice explicative ne remplace pas les modes d'emploi disponibles pour chaque produit.

\* La durée d'utilisation dépend du nettoyage et du produit de nettoyage utilisé, de la durée de port quotidienne, de la pression thérapeutique et de la sécrétion de sueur individuelle. L'utilisation de la deuxième jupe du masque (fournie en option) ne prolonge pas la durée d'utilisation.

\*\* Pour le nettoyage quotidien, nous recommandons un détergent spécial, p. ex. Löwosan.



Sur notre canal YouTube, vous trouverez des instructions informatives, des exemples d'utilisation et de précieux conseils :  
<https://www.youtube.com/@lowensteinmedicalfrance2545>

CE 0197



**Maison mère**  
 Löwenstein Medical  
 Kronsaalweg 40  
 22525 Hamburg, Germany  
 T: +49 40 54702-0  
 F: +49 40 54702-461  
 info@loensteinmedical.de

**Ventes + Service**  
 Löwenstein Medical  
 Arzbacher Straße 80  
 56130 Bad Ems, Allemagne  
 loensteinmedical.com

**Ventes + Service**  
 Löwenstein Medical Schweiz  
 Seestrasse 14b  
 5432 Neuenhof, Suisse  
 T. +41 (0)56 4 16 41 26  
 F. +41 (0)56 4 16 41 21  
 info@loensteinmedical.ch  
 loensteinmedical.com

**Ventes + Service**  
 Löwenstein Médical France  
 6, Rue de l'Aulnay-Dracourt  
 91300 Massy, France  
 T. +33 (0)1 69 35 53 20  
 france@loensteinmedical.com  
 loensteinmedical.com

